

エンドメイトDT 標準セット



医療機器承認番号21600BZZ0065000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイトDT 標準セット	Y141-119	¥142,000

標準セット内容

- コントロールユニット ●モーター&コード
- MP-F20Rヘッド (減速20:1) ●ACアダプター
- ハンドピーススタンド

仕様

- 電源: AC100V / 電池パック ●設定可能プログラム数: 9 ●最大トルク値: 7Ncm (20:1ギア使用時)
- 回転速度範囲: 100~13,000min⁻¹ (20:1, 4:1, 1:1のギアの組み合わせによる)
- 充電時間 / 連続使用時間: 充電5時間 / 連続使用2時間 (定格負荷)
- ユニット寸法: W92×D148×H124mm ●質量: ユニット: 456g、モーター&ハンドピースコード: 92g

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイトDT サブセット	Y141-122	¥108,500

サブセット内容

- コントロールユニット ●モーター&コード
- ACアダプター ●ハンドピーススタンド
- ※サブセットにヘッドは含まれておりません。別途ご購入ください。

製品名	製品番号	標準価格
○MP-F20R	Y110-044	¥33,500
●MP-F16R	Y110-096	¥33,500
●MP-F4R	Y110-047	¥30,500

- ミニヘッド ●360°回転 ●減速20:1 / 16:1 / 4:1
- Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ●プッシュボタン式チャック

製品名	製品番号	標準価格
○MPA-F20R	Y110-045	¥43,500
●MPA-F16R	Y110-097	¥43,500
●MPA-F4R	Y110-051	¥40,500

- 根管長測定器接続用 (ロングシャック用)
- ミニヘッド ●360°回転 ●減速20:1 / 16:1 / 4:1
- Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ●プッシュボタン式チャック

製品名	製品番号	標準価格
○MPAS-F20R	Y110-046	¥43,500
●MPAS-F16R	Y110-098	¥43,500
●MPAS-F4R	Y110-052	¥40,500

- 根管長測定器接続用 (ショートシャック用)
- ミニヘッド ●360°回転 ●減速20:1 / 16:1 / 4:1
- Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ●プッシュボタン式チャック

製品名	製品番号	標準価格
○NML-F16R	Y110-019	¥31,000

- ミニヘッド ●360°回転 ●減速16:1
- Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ●タッチ式

製品名の左にある○印は、○ホワイト = 20:1減速
ヘッドの減速比を示しています。●グレー = 16:1減速
掲載写真は全て減速20:1 ●グリーン = 4:1減速



スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
エンドメイトDT ユニット		U421	¥52,500
エンドメイトDT モーター&コード		E275	¥40,000
エンドメイトDT アダプター		U478	¥16,000
ハンドピーススタンド		Z095-206	¥2,000
FC-15 フットペダル		Z248	¥6,500
コード MPA / MPAS用		C876-021B	¥1,500
コード押さえ		C876-509	¥500
電池		U421-070	¥5,900
Fタイプ スプレーノズル		Z256-090	¥1,000

根管長測定器接続用ヘッド

MPA / MPAS は根管長測定器に接続してご使用いただくためのヘッドです。エンドメイトDTと根管長測定器との併用で、より快適・簡単・安全・的確な診療を可能にします。ヘッドは135℃でオートクレーブ可能です。

【選べる2つのヘッド】 Ni-Tiファイルのシャック長に応じて、2種類のヘッドから選択できます。

【接続・解除の方法】 (写真はMPAヘッド)



※K3は、Sybron Dental Specialties Inc.の登録商標です。エンドウェーブは、J.MORITA CORPORATIONの登録商標です。

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289 (64)3380
FAX: 0289 (62)5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03 (5828) 7716
FAX: 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL: 06 (6350) 7217
FAX: 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間 (土日祝日除く) **0120-7242-56**
9:00~17:00
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。



エンドメイト DT
ENDO MICROMOTOR WITH TORQUE CONTROL

ENDO-MATE DT

smart & portable



Ni-Ti ファイル用
マイクロモーターの
新しいスタンダードを
提供します。



Powerful Partners®

ENDO-MATE DT


エンドメイトDTは、各社製Ni-Tiファイルに対応できるマイクロモーターとして開発されました。各メーカーのファイルの使用法に合わせて、適正回転数とトルク値をプログラムでき、スムーズな治療を可能にします。コントロールユニットは、軽量・コンパクトなバッテリー式で、どこでもすぐに使用できます。ハンドピースは、軽量でしかも大変細く、高い操作性を提供します。エンドメイトDTは、パワフルなパートナーとして根管治療をサポートします。

エンドメイトDTの特長


1. 各社Ni-Tiファイルに対応
2. トルクコントロール、オートリバース機能付
3. コンパクトなデスクトップタイプ
4. 大きく見やすい液晶ディスプレイ
5. 操作性に優れたフラットパネル
6. 持ち運び自由自在な充電式タイプ
7. 軽く、細く、疲れにくいハンドピース
8. 便利な手元スイッチ



操作性に優れたフラットパネル

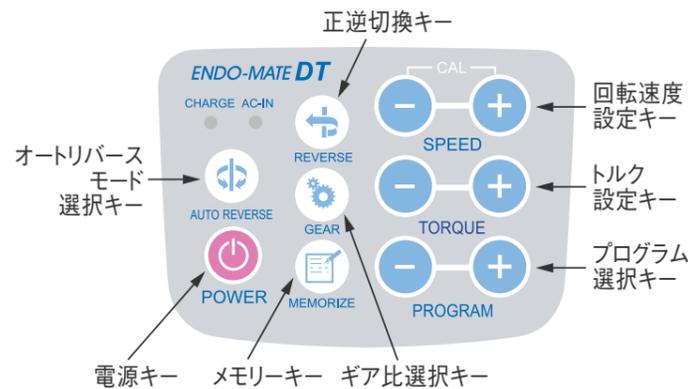


大きく見やすい液晶ディスプレイ

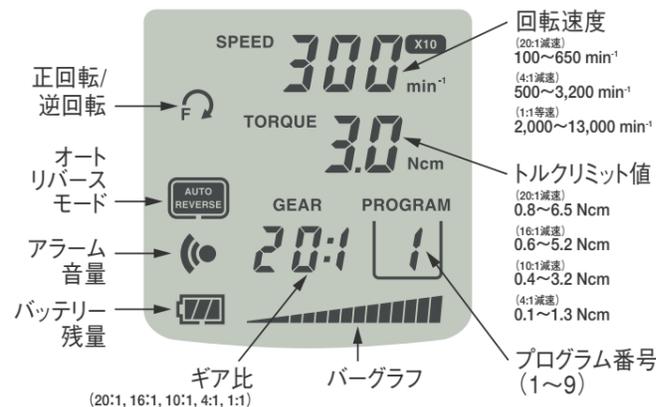

軽く、細く、疲れにくいハンドピース

6ポジションヘッド

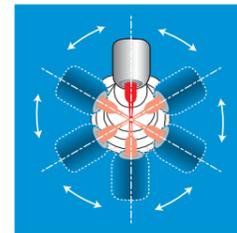

ヘッドの取付け角度は6通り。部位に応じてヘッドの向きを変えたり、押しやすい位置にON/OFFボタンをセットできるので、操作性が大幅に向上します。

ON / OFF切換えは手元でOK

使い勝手に合わせて2通りのON / OFF動作が選択できます。
A : 押している間ON、離すとOFF
B : 一度押すとON、もう一度押すとOFF



※ハンドピースの写真は原寸大です。

プッシュボタン式超ミニヘッド

超ミニヘッドにより口腔内での高い視野を確保し、より正確な治療を可能にします。

クイックジョイント



クイックジョイントのため、様々なヘッドが簡単に交換できます。また、ヘッドの部分はオートクレーブが可能です。

各社のNi-Tiファイルに対応

9つのプログラム設定が可能

各社Ni-Tiファイルの使用法に合わせて最大9つまでのプログラム(トルク、スピード等)がメモリーできます。複数のファイルをご使用になる場合でも、簡単に設定を切り替えることができ、ファイルごとに設定する煩わしさから解放され、スムーズな根管拡大を可能にします。

ヘッドの組み合わせで広範囲な回転域をカバー

標準のギア(20:1)以外にも、オプションの異なるギア比のヘッドを選択することにより、広範囲な回転を実現し、PMTC等にも使用できます。

ギア比	回転速度 (min ⁻¹)
20:1	100~650
4:1	500~3,200
1:1	2,000~13,000

選べるオートリバースモード

設定したトルクリミッター値に達した後、次の動作から選択できます。

- AUTO REVERSE** オートリバース後、負荷がなくなると正回転に戻る
- AUTO REVERSE** オートリバース後、負荷がなくなると停止
- オートリバースなし (正回転のみ)**

持ち運び自由自在な充電式タイプ

(AC電源でも動作可能)

持ち運び自由自在な充電式。場所を選ばずご使用になれます。またAC電源でも使用できるため、バッテリー切れの心配をする必要がありません。
※連続使用時間 約2時間 (充電時間5時間)

フットペダルでも操作可能



ハンドピースの手元スイッチの他に、オプションのフットペダルでも、回転のON/OFFが可能です。先生方のお好みのスタイルでご使用いただけます。

その他の機能

- 設定したトルク値の約半分に達すると、アラーム音でお知らせ
- 10分間の無操作で自動的に電源をOFF
- 電池バックの残量は、液晶ディスプレイに表示