



MAINTENANCE

iCare



日々の診療に不可欠なハンドピースの自動注油システム

ハンドピースのタイプに応じて、適正な注油量がプリセットされており、簡単なボタン操作のみで、ハンドピースのメンテナンスが完了。

さらにチャック清掃機能により、チャック内部の汚れや磨耗粉を効果的に取り除くことで、チャック由来のトラブルを未然に防ぎ、長期にわたりハンドピースをより良い状態に維持します。


また、オイル注油量の最適化などにより、ランニングコストを低減します。

シンプル操作で、確実な注油

エアタービン・コントラアングル、それぞれに合わせた適切な注油量がプリセットされているため、ボタンを押すだけの簡単な操作で、ハンドピースの自動注油が行えます。


エアタービン

エアタービンは、エア回路、注水回路、およびチップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

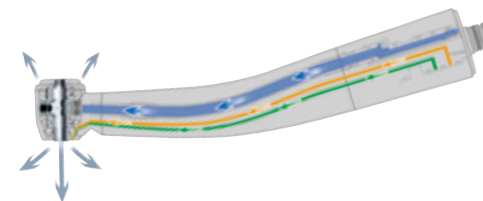

コントラアングル

コントラアングルは、ハンドピースのギアをモーターで回転させながら注油。複雑なギアの隅々まで確実にオイルを送り込むことが可能です。注水回路、チップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

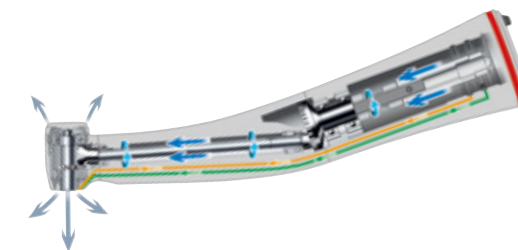

エアの吹き出し時間を選択

注油後、余剰オイルを排出するためのエアの吹き出し時間を選択できるため、ハンドピースの使用環境やお好みに合わせたメンテナンスが可能です。



チャック清掃機能

付属のチャック清掃用ノズルを使用することで、チャック内部の汚れや磨耗粉を取り除きます。




オイルミスト漏れを軽減（別売品）

ハンドピースヘッドフィルターを装着して注油を行うことで、オイルミスト漏れを軽減します。



着脱が簡単な前面ドア

前面ドアを完全に取り外すことができるため、庫内のお手入れが簡単に行えます。

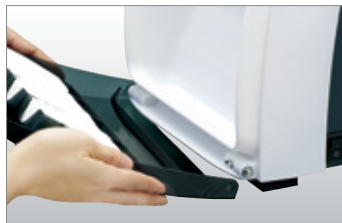

大型オイルタンク

iCareの大型タンク(1.2 L)は、メンテナンスオイル(1 L)を1回で補充できるため、余ったオイルの保管場所や、ボトルからのオイル漏れによる汚れの心配がなく、衛生的です。メンテナンス用ノズルを使用することで、上蓋から簡単・確実に補充できます。



各社タービン装着用のアダプターを用意

各社のエアータービンもアダプター(別売品)をタービンジョイントの形状に合わせて装着するだけで、使用することができます。

iCare専用メンテナンスオイル

iCareの高い注油効果の実現に欠くことができない専用のメンテナンスオイルです(付属品)。お得な6本入りセットもご用意。

アラーム機能で安全動作を実現

オイルの不足時やエア圧の低減時など、本体の異常を自動で検知し、操作パネル上にLEDの点灯・点滅によるエラー表示をします。

スタイリッシュ & コンパクト

医院内での使いやすさを追い求めたiCareは、スタイリッシュでコンパクトなデザインのため、限られたスペースの中で効率よく設置できます。



iCare 標準セット



C2 Type

コントラ2本、エアータービン2本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C2 Type	Y1002794	¥236,000



C3 Type

コントラ3本、エアータービン1本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C3 Type	Y1002795	¥254,000

セット内容 ●iCare ユニット ●電源コード ●iCare用メンテナンスオイル(1 L) ●ミストフィルターセット ●エアークューブ
●オイルシート ●チャック清掃用ノズル

仕 様 ●寸法: W 280 × D 240 × H 350 mm ●重量: 6.5 kg (C2タイプ / C3タイプ) ●電源: AC 100 V 50/60 Hz
●適正空圧: 0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm²) ●タンク容量: 1.2 L

- エアータービン取付ジョイントはミッドウェスト4ホール
- エア配管が必要となります。(5.0-6.0 kgf/cm²)
- エアーケーラー(弊社製Ti-Max S970シリーズを除く)、およびパテラスエアーモーターはメンテナンスオイルが抜けにくい構造のため、本製品では使用できません。これらのハンドピースへ注油を行う場合は、各製品の取扱説明書に従って注油してください。
- 血液などがハンドピース内に浸入した場合は、パナスプレープラスでのメンテナンスをおすすめします。本製品では十分な洗浄が行えず、血液などが内部で凝固するなど故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品はハンドピース内部の洗浄を意図した製品ではありません。

iCare アダプター

※アダプターは、エアタービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

製品名	製品番号	標準価格
PTL アダプター	Z257010	¥10,000

- パテラス、マッハ用

製品名	製品番号	標準価格
B2 / M4 アダプター	T904	¥6,600

- ボーデン2ホール用

製品名	製品番号	標準価格
KV アダプター	Z257020	¥10,000

- カボ用

製品名	製品番号	標準価格
SR アダプター	Z257023	¥10,000

- シロナ用

製品名	製品番号	標準価格
WH アダプター	Z257021	¥10,000

- W&H用

製品名	製品番号	標準価格
BA アダプター	Z280022	¥10,000

- ピエン・エア用

製品名	製品番号	標準価格
MT アダプター	Z257030	¥10,000

- モリタ用

製品名	製品番号	標準価格
MH アダプター	Z257048	¥10,000

- モリタ4H用

製品名	製品番号	標準価格
YS アダプター	Z257031	¥10,000

- ヨシダ用

製品名	製品番号	標準価格
YS-2 アダプター	Z257044	¥10,000

- ヨシダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS アダプター	Z257032	¥10,000

- オサダ用

製品名	製品番号	標準価格
OS-2 アダプター	Z257034	¥10,000

- オサダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS-4 アダプター	Z257038	¥10,000

- オサダ用(ライト付) ●排気回収タイプ

製品名	製品番号	標準価格
F-タイプ アダプター	Z280042	¥10,000

- エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド

メンテナンスオイル

製品名	製品番号	標準価格
iCare用メンテナンスオイル 1 L	Z016130	¥10,500
iCare用メンテナンスオイルセット 6本入	Y1002783	¥60,000

マルチスタンド

エアタービン、コントラアングルハンドピースなどの注油後の保管に便利です。ハンドピースと一緒に135℃でオートクレープ可能です。



製品名	製品番号	標準価格
マルチスタンド フルセット	Z036	¥5,000

- パテラスエアタービン / モーター用、E-タイプ®コントラ用
 - スタンド用ポスト(A)、(B) × 各5個
 - スタンド用ポスト(C) × 4個
- ※ISO3964準拠品



製品名	製品番号	標準価格
マルチスタンド パテラス用	Z036002	¥3,500

- スタンド用ポスト(A) × 3個
- スタンド用ポスト(C) × 2個

マルチスタンド用ポスト

製品名	製品	製品番号	標準価格
スタンド用ポスト(A)		●パテラス エアタービン用 ●パテラス モーター用	Z036201 ¥200
スタンド用ポスト(B)		●E-タイプ® コントラ用 ※ISO3964準拠品	Z036202 ¥200
スタンド用ポスト(C)		●パテラスカップリング用 ●マッハカップリング用	Z036203 ¥200
スタンド用ポスト(KV)		●カボ エアタービン用	Z036204 ¥200
スタンド用ポスト(SR)		●シロナ エアタービン用	Z036205 ¥200
スタンド用ポスト(WH)		●W&H エアタービン用	Z036207 ¥200
スタンド用ポスト(BA)		●ピエン・エア エアタービン用	Z036206 ¥200
スタンド用ポスト(MT)		●モリタ エアタービン用	Z036208 ¥200
スタンド用ポスト(FL)		●オサダファインジョイント用	Z036213 ¥200
スタンド用ポスト(F)		●エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用	Z036209 ¥200



(1 L)

PANA SPRAY Plus

「パナスプレープラス」には、アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、タービン・コントラなどに内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。

また、アルコール入りのため、スプレー使用時の潤滑油による手のベタつきも軽減され、より使いやすくなっています。



製品名	製品番号	標準価格
パナスプレープラス	Z182100	¥4,700

●エアータビン、ハンドピース用 ●480 mL ●アルコール含

製品名	製品番号	標準価格
パナスプレープラス 6本セット	Y900630	¥24,000

製品名	製品番号	標準価格
チップノズル	Z020010	¥200

スプレーミスト吸収パック


スプレーによるハンドピースへの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックにより、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。また、手にもオイルが付着しないため、ハンドピースのメンテナンスを楽に行えます。



製品名	製品番号	標準価格
スプレーミスト吸収パック	Y900084	¥4,700

●10/パック入

パナスプレープラス用ノズル

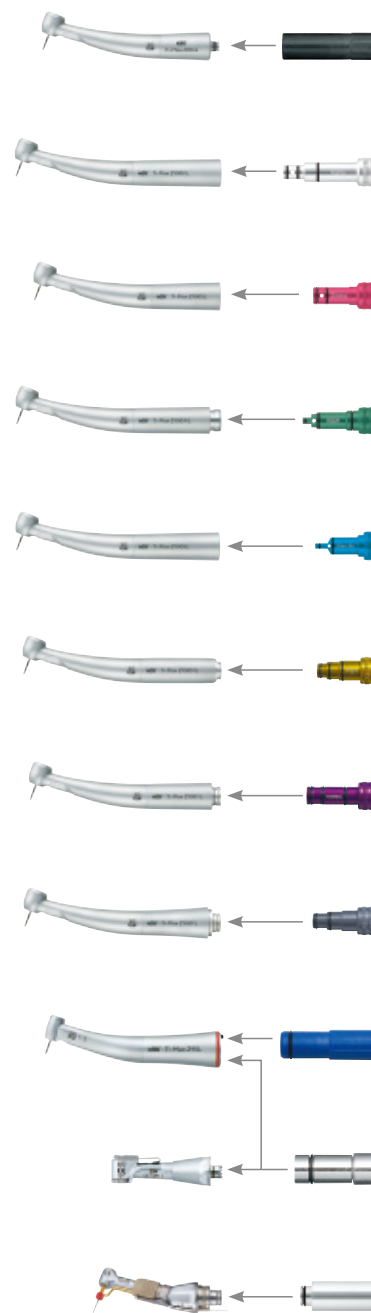

製品名	製品番号	標準価格
パテラス スプレーノズル	P183090	¥1,000

●パテラスカップリング式 エアータビン / モーター用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(KV)	Z090051	¥1,500

●KaVo® Multiflex® カップリング用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(SR)	Z090052	¥1,500

●Sirona® Quick coupling用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(WH)	Z090054	¥1,500

●W&H® Roto Quick カップリング用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(BA)	Z090053	¥1,500

●Bien Air® UNIFIX® カップリング用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(ML)	Z090055	¥1,500

●モリタαメインチューブ用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(YS)	Z090057	¥1,500

●ヨシダクイックジョイント用

製品名	製品番号	標準価格
スプレーノズル(FL)	Z090062	¥1,500

●オサダファインジョイント用

製品名	製品番号	標準価格
E-タイプスプレーノズル	Z019090	¥1,000

●E-タイプ用® ※ISO3964準拠品

製品名	製品番号	標準価格
サージカルスプレーノズル	Z114090	¥1,000

●E-タイプ用® ●SGM-I / SGMS-I ヘッド用 ※ISO3964準拠品

製品名	製品番号	標準価格
F-タイプスプレーノズル	Z256090	¥1,000

●エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用

135℃
111
122 オートクレーブ可能

EZ SPRAY



EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着してオイルの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく、誰がやっても簡単にオイルメンテナンスが行えます。

また、各社のエアータービンハンドピースをご使用いただく場合は、各社タービン装着用アダプターセットをご使用ください。

ライト付 / ライト無コントラアングル
ハンドピース(E-タイプ仕様)

パテラスカップリング式
エアータービンハンドピース

各社仕様タービン

各社仕様タービンに使用する際は、各社仕様タービン
装着用アダプターをご使用ください。

製品名	製品番号	標準価格
EZスプレー標準セット	Y900070	¥24,000

セット内容

- EZスプレーグリップ ●コイルチューブ
- グリップホルダー ●缶ホルダー ●切換バルブ
- PA用ノズル ●スプレーミスト吸引パック(1パック)



※ナカニシのパススプレープラス専用です。
パススプレープラスとPTL用ノズルは付属しておりません。

各社仕様エアータービン装着用アダプター (各社用アダプター + EZ-M4アダプター)

※アダプターは、エアータービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

製品名	製品番号	標準価格
KV アダプター	Z257020	¥10,000

- カボ用

製品名	製品番号	標準価格
SR アダプター	Z257023	¥10,000

- シロナ用

製品名	製品番号	標準価格
WH アダプター	Z257021	¥10,000

- W&H用

製品名	製品番号	標準価格
BA アダプター	Z280022	¥10,000

- ビエン・エア用

製品名	製品番号	標準価格
MT アダプター	Z257030	¥10,000

- モリタ用

製品名	製品番号	標準価格
MH アダプター	Z257048	¥10,000

- モリタ4H用

製品名	製品番号	標準価格
YS アダプター	Z257031	¥10,000

- ヨシダ用

製品名	製品番号	標準価格
YS-2 アダプター	Z257044	¥10,000

- ヨシダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS アダプター	Z257032	¥10,000

- オサダ用

製品名	製品番号	標準価格
OS-2 アダプター	Z257034	¥10,000

- オサダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS-4 アダプター	Z257038	¥10,000

- オサダ用(ライト付) ●排気回収タイプ

製品名	製品番号	標準価格
F-タイプ アダプター	Z280042	¥10,000

- エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
EZ-M4 アダプター	Z229040	¥5,000

EZグリップセット



注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZグリップを使用する場所には、エアチューブ(外径φ6 mm)のエア配管が必要です。

製品名	製品番号	標準価格
EZグリップセット	ZA02290100	¥16,000

- EZスプレーグリップ ●コイルチューブ ●エア配管用継手PEG6-4

Multi Gauge

給気圧、排気圧、水圧、チップエア圧を正確に測定できるので、エアータービンなどの適正圧力の設定が可能になります。







製品名	製品番号	標準価格
MG-4H マルチゲージ	Z109400	¥25,000

● ライト付ISO標準4ホール、ミッドウェスト4ホール / 5ホールの手元圧測定

エアータービン適正エア圧

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Handpieces Air Pressures

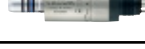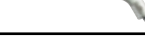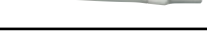			適正エア圧 MPa(kgf/cm ²)
エアータービン		Ti-Max Z800 / Z900	0.25-0.30 MPa (2.5-3.0 kgf/cm ²)
		S-Max M micro	
		S-Max M800 / M900	
		S-Max pico	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)
		Ti-Max X450	
エアーモーター		Ti-Max X205L	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)
		S-Max M205	
歯面清掃用ハンドピース		Prophy-Mate neo	0.25-0.35 MPa (2.5-3.5 kgf/cm ²)
		Perio-Mate	0.30-0.40 MPa (3.0-4.0 kgf/cm ²)
エアースケーラー		Ti-Max S970	0.30 MPa (3.0 kgf/cm ²)
技工用ハンドピース		PRESTO AQUA LUX	0.25-0.30 MPa (2.5-3.0 kgf/cm ²)
		PRESTO AQUA II	
		PRESTO II	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)

※NSK/パテラスカップリングタイプ

薬事情報一覧

■エアータービン

販売名：ティーマックス Z T 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス M T 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス p i c o 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X 4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09BZX00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス Z C 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z 4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス X C 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス X S 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース F Xシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース F X 6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース E Xシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース N R S 2 承認番号：22200BZX00204000
販売名：NSK プロフィー A R 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根研磨用ハンドピース E V A 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ V M 承認番号：20800BZX00762000
販売名：ストレートハンドピース E X - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ M P 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ M P A S 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：i s o E-ラテックス 届出番号：09BZX00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X 2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M 2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリ奥斯コンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリ奥斯 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリ奥斯 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S 9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケーラ用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09BZX00016000034
販売名：クリーニングパウダー 届出番号：09BZX00016000001
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09BZX00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09BZX00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフィー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト T C 2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサポート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G 5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリ奥斯 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000124
販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 届出番号：09BZX00016000123
販売名：ティーマックス X-S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000042
販売名：エスマックス S G 2 0 届出番号：09BZX00016000041
販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09BZX00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G 4 5 届出番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro 2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09BZX00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM 5-E R 届出番号：09BZX00016000018
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 届出番号：09BZX00016000013
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 2 届出番号：09BZX00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09BZX00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09BZX00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR 2-E 届出番号：09BZX00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO 2-E 届出番号：09BZX00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT 2-E 届出番号：09BZX00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：i S D 9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09BZX00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オセオ 100+ 届出番号：09BZX00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09BZX00016000030
販売名：ポリバー-i 7 届出番号：09BZX00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09BZX00016000038
販売名：プレスト アクア Ⅱ 届出番号：09BZX00016000010
販売名：プレスト Ⅱ 届出番号：09BZX00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

カスタムエアークレーブは、(株)モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultitexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bian AirとUNI-FIXは、Bian Air Holding SAの登録商標です。
W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。
iPAD®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間:平日9:00～17:00

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。

仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。
(標準価格は2021年9月1日現在のものです)

