



## ● ● ● オイル排出時の注意 ● ● ●

ハンドピース内の余分なオイルを排出するために空運転する場合は、以下の方法で行ってください。

- 1) 注油後、ハンドピースをモータに接続します。
- 2) バーを取り付けずに 15 秒ほど空運転します。

### ⚠ 注意

- ・空運転の際、オイル飛散を防ぐためヘッドに布等をあてがう場合は、プッシュボタンを押しないように注意してください。バーが取り付けられなくなる恐れがあります。

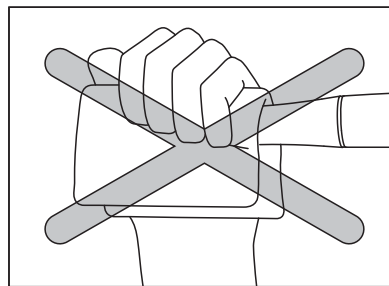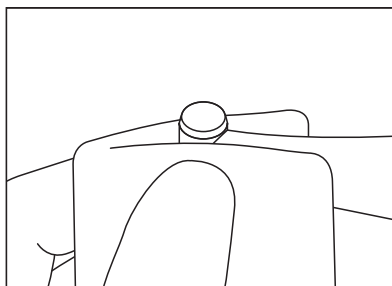



### お知らせ

- ・ハンドピースヘッドからのオイル飛散を防ぐため、スプレーミスト吸収パック (REF: Y900084) の使用をお勧めします。

### ■ハンドピース内の余分なオイルの排出

余分なオイルの排出には、EZ グリップ (REF: ZA02290100) の使用をお勧めします。

- 1) EZ グリップのインサートをハンドピース後部へ挿し込みます。
- 2) エアブローボタンを押してハンドピース内に残留したオイルを排出します。
- 3) 固定解除ボタンを押しながらハンドピースを引き抜きます。

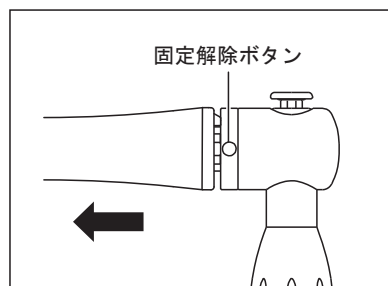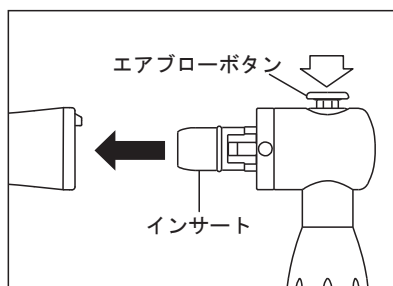

### ⚠ 注意

- ・ハンドピース内の余分なオイルにより発熱する恐れがあるため、注油後はオイルを排出してください。
- ・ハンドピースをカチッというまで挿し込んだあと軽く引き、ハンドピースが抜けないことを確認してください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。
- ・エアブロー中は固定解除ボタンを押ししないでください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。