

1 使用目的

注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。

2 安全上の注意


- ご使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 危険事項の説明は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意の区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
▲ 注意	「軽度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。
お知らせ	「故障や性能低下を起さないためにお守り頂きたいこと、仕様や性能に関して知っておいて頂きたいこと」を説明しています。

▲ 注意

- 使用する前にこの取扱説明書を読み、各部の機能をよく理解してから使用を開始してください。
- 取扱説明書に記載されていない改造・分解をしないでください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 使用中、少しでも異常を感じたら使用を中止して、販売店まで連絡してください。
- 本製品は、弊社製ハンドピースにのみ使用してください。

3 同梱物

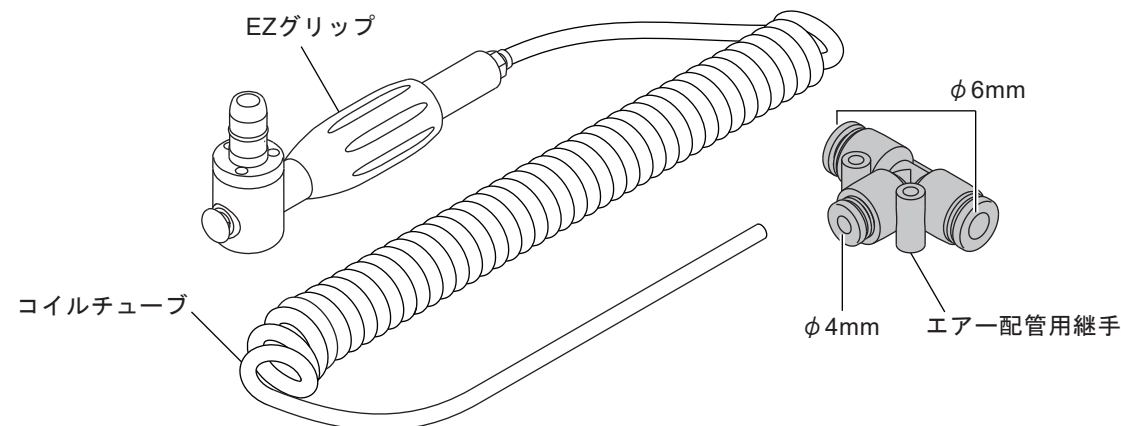

4 使用前の準備

EZグリップを使用する場所には、エアチューブ（外径φ6mm）のエア配管が必要です。


4-1 エアチューブの接続

お知らせ

- チューブの着脱方法を動画で紹介しています。アクセスできない場合は、株式会社 日本ピスコのホームページを確認してください。




- ① エア配管の元栓（元栓）を止めます。チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ② EZグリップを設置するエアコンプレッサー等と他の機器等をつないでいるエアチューブをカットします。
- ③ エア配管用継手φ6mm2ヶ所に、カットしたエアチューブをそれぞれ奥まで挿し込みます。
- ④ エアチューブを押し引きしてエア配管用継手から抜けにくいことを確認します。

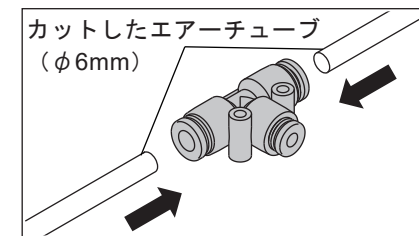

4-2 コイルチューブの接続

- ① エア配管用継手φ4mmに、コイルチューブ（外径φ4mm）を奥まで挿し込みます。
- ② コイルチューブを押し引きして、エア配管用継手から抜けにくいことを確認します。
- ③ エア配管の元栓を開けます。

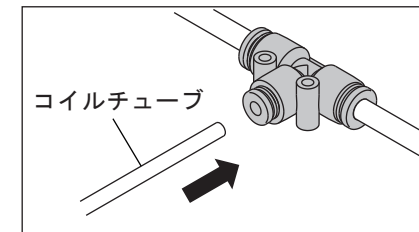




▲ 注意

- エア配管用継手は外径φ6mmエアチューブ用です。外径φ6mm以外のエアチューブを利用する場合は、外径に合った継手等を使用してください。
- 本製品の適正エア圧力は0.5~0.6MPa（5~6kgf/cm²）です。
- エアチューブがねじれたり、つぶれたりしないように注意してください。
- エアチューブの接続が困難な場合は、販売店まで連絡してください。
- エア元（エアコンプレッサー等）の水抜きを1週間に1度行ってください。
- 使用するエアはごみ、水、オイル等が混入しない清浄なエアを使用してください。

5 使用方法

ハンドピース注油後、以下の方法でハンドピース内の余分なオイルを排出してください。

- ① EZグリップのインサートをハンドピース後部へ挿し込みます。
- ② エアブローボタンを10秒程度押し続けてハンドピース内に残留したオイルを排出します。
- ③ 固定解除ボタンを押しながらハンドピースを引き抜きます。

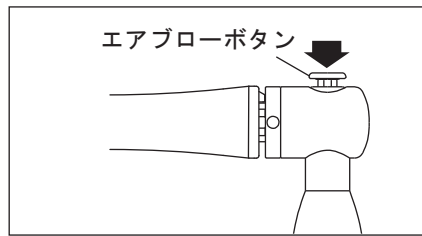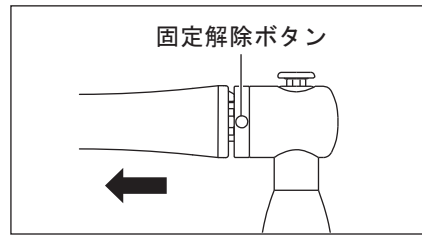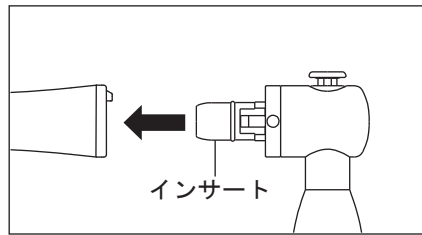

▲ 注意

- ハンドピース内の余分なオイルにより発熱する恐れがあるため、注油後はオイルを排出してください。
- ハンドピースをカチッというまで挿し込んだあと軽く引き、ハンドピースが抜けないことを確認してください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。
- エアブロー中は固定解除ボタンを押ししないでください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。

お知らせ

- ハンドピースヘッドからのオイル飛散を防ぐため、スプレーミスト吸収パック ([REF]: Y900084)の使用をお勧めします。

6 保守

6-1 清掃

EZグリップに汚れが見られる場合は、水を含ませた布等で丁寧に拭き取ります。


▲ 注意

- 本製品は滅菌できません。

6-2 Oリングの交換

インサート部からエア漏れ等の症状が現れたら、Oリングを交換してください。

- ① 交換するOリングを指先でたるみをつけて取り外します。
- ② 新しいOリングを外したOリングがはまっていた溝にはめ込みます。
※交換用Oリングはスペアパーツを参照してください。

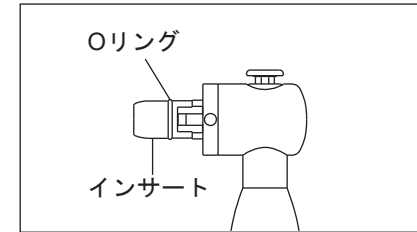

7 スペアパーツ

製品名	REF
Oリング	D0312060100

8 製品廃棄

製品の廃棄が必要な場合は、自治体の指示に従って適切に廃棄してください。

9 仕様

9-1 仕様

型式	EZグリップ
[REF]	ZA02290100
適正エア圧	0.5~0.6MPa (5~6Kgf/cm ²)

9-2 シンボルマーク

⚠ 注意
取扱説明書参照

[REF] カタログ番号 (製品番号)

[SN] シリアル番号

株式会社ナカニシ
〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向 700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
www.nsk-nakanishi.co.jp

お客様相談窓口
☎0120-7242-56
9:00-17:00/土日・祝日を除く
cs@nsk-nakanishi.co.jp



ウェブサイトへ
アクセス