



電源をON/OFFする

→取扱説明書 4参照

POWERキーを**2秒以上押し続け**ます。

ギア比の設定

→取扱説明書 4参照

SELECTキーを2回押し**ギア比設定“GR”**を選択して、装着しているコントラアングルヘッド（ギア）と表示されているギア比が**あ**っていることを確認してください。異なる場合はUP/DOWNキーを押して設定をあわせてください。



回転速度の設定

→取扱説明書 4参照

SELECTキーを1回押し**回転速度“SP”**が表示された状態にしてから、UP/DOWNキーを押して設定してください。



トルクの設定

→取扱説明書 4参照

SELECTキーを押し回転速度“SP”が消えて**トルク設定“TQ”**だけが表示された状態にしてから、UP/DOWNキーを押して設定してください。



オートリバース機能の設定

→取扱説明書 5-5-1参照

SELECTキーを**2秒以上押し続け**ると“SP” “TQ”が消えオートリバースマークが点滅します。SELECTキーを押し続け点滅させた状態でUP/DOWNキーを押して選択してください。

Ⓐ : 自動継続（オートリバースしたあと、負荷が無くなれば再び正回転に戻ります）

Ⓐ : 自動停止（オートリバースしたあと、負荷が無くなれば停止します）

Ⓐ/非表示 : オートリバースOFF（オートリバースしません）



プログラム機能

→取扱説明書 6-1参照

PROGRAMキーを押し記憶設定させたいプログラム番号を選択します。回転速度、トルクリミット値、ギア比、オートリバースモードを設定後、PROGRAMキーを**2秒以上押し続け**記憶させます。プログラムは5個記憶させることができます。

作動させる

→取扱説明書 5-5参照

ON/OFFキーを押すとモーターハンドピースの回転が始まります。

通常の回転操作：ON/OFFキーを短く押すと回転し、もう一度押すと停止します。

一時的な回転操作：ON/OFFキーを**2秒以上押し続け**ると押し続けている間回転し、離すと停止します。



ON/OFFキー

